

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ortopedický polštář mezi kolena

SYMBOL: 24058; EAN/GTIN: 5907451329665

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - POKYNY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ

Ortopedický vankúš medzi kolena

SYMBOL: 24058; EAN/GTIN: 5907451329665



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

POPIS

Ortopedický polštář je perfektním řešením pro lidi, kteří hledají oporu a pohodlí při spánku. Polštář díky svému ergonomickému tvaru zajišťuje správnou polohu těla, snižuje napětí v páteři, kyčlích a kolenou. Vyrobeno z vysoce kvalitní paměťové pěny, dokonale se přizpůsobí tvaru těla a nabízí podporu a pohodlí na nejvyšší úrovni.

APLIKACE

- Snižuje napětí v dolní části páteře.
- Pomáhá zmírnit bolesti kyčlí, kolen a zad.
- Zlepšuje držení těla během spánku.
- Podporuje regeneraci po úrazech a úrazech.
- Vhodné pro těhotné ženy, poskytuje dodatečnou podporu během spánku.

TIP

- Výrobek by měl být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: 23 cm x 22 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Ortopedický polštář je určen pro použití při spánku nebo odpočinku. Nemělo by se používat jako hračka, sedátko nebo k jinému účelu, který by jej mohl poškodit.
- Ujistěte se, že polštář nemá žádné mechanické poškození, jako jsou praskliny, trhliny nebo deformace, které mohou ovlivnit jeho účinnost.
- Polštář není odolný vůči vysokým teplotám. Udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla, abyste předešli riziku požáru.
- Polštář by měl být skladován v suchém prostředí, aby se zabránilo růstu plísní nebo hub na materiálu.
- Pravidelně čistěte snímatelný kryt, abyste zajistili hygienické podmínky používání. Paměťovou pěnu neperte v pračce – v případě potřeby ji jemně otřete vlhkým hadříkem.
- Na polštáři nesedějte ani nestůjte, mohlo by dojít k poškození jeho struktury a snížení funkčnosti paměťové pěny.
- Pokud jste alergičtí na materiály, ze kterých je polštář vyroben, poraďte se před jeho použitím se svým lékařem.
- Děti by neměly polštář používat bez dozoru, aby se zabránilo riziku nesprávného použití nebo poškození výrobku.
- Pokud dojde k poškození vnějšího krytu nebo samotné pěny, přestaňte výrobek používat, abyste zabránili kontaktu s vnitřními materiály.
- Jakmile obdržíte svůj nový polštář, nechte jej několik hodin v dobře větrané místnosti, abyste odstranili veškerý zápach způsobený výrobním procesem.
- Vyhnete se používání polštáře ve vlhkém prostředí nebo na mokřem povrchu, aby nedošlo k poškození materiálů.
- Pokud trpíte onemocněním páteře, kyčlí nebo kolen, poraďte se před pravidelným používáním ortopedického polštáře se svým lékařem.

SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ

- Polštář by měl být skladován na suchém, větraném místě, mimo vlhkost, aby se zabránilo růstu plísní a hub.
- Neskladujte polštář na přímém slunci, protože to může ovlivnit trvanlivost paměťové pěny.
- Uchovávejte polštář v ochranném obalu nebo krabici, aby se nehromadil prach.
- Neskladujte polštář v blízkosti radiátorů, kamen nebo jiných zdrojů tepla, protože vysoká teplota může pěnu poškodit.
- Pokud si polštář berete na výlet, použijte ochranný sáček, který zabrání ušpinění nebo poškození.
- Použijte jemný mycí prostředek.
- Pěnu neperte v pračce ani ji neponořujte do vody, mohlo by dojít k poškození materiálu.
- V případě znečištění povrchu jemně otřete vlhkým hadříkem nebo houbou. Vyhnete se nadměrnému namáčení.
- Nechte pěnu zcela vyschnout na vzduchu na dobře větraném místě.
- Při čištění pěny a povlaku na polštář se vyhněte agresivním chemikáliím, bělidlům nebo odstraňovačům skvrn, které mohou poškodit materiál.
- Abyste se zbavili zápachu, vystavte polštář na několik hodin čerstvému vzduchu (vyhýbejte se přímému slunečnímu záření).
- K odstranění chlupů nebo drobných nečistot můžete použít váleček na prádlo nebo vysavač s jemnou špičkou.
- Povlak na polštář perte každých pár týdnů nebo podle potřeby pro udržení hygieny.
- Pěnu čistěte pouze v případě potřeby.
- Dodržování správné hygieny a správné skladování udrží polštář v dobrém stavu po dlouhou dobu, zajistí pohodlí a funkčnost.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

- Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.
- Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

SK

Vážený pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

POPIS

Ortopedický vankúš je dokonalým riešením pre ľudí, ktorí hľadajú oporu a pohodlie pri spánku. Vďaka svojmu ergonomickému tvaru vankúš zaisťuje správnu polohu tela, znižuje napätie v chrbtici, bedrách a kolenách. Vyrobené z vysoko kvalitnej pamäťovej peny, dokonale sa prispôbi tvaru tela a ponúka podporu a pohodlie na najvyššej úrovni.

APLIKÁCIA

- Znižuje napätie v dolnej časti chrbtice.
- Pomáha zmierniť bolesti bedier, kolien a chrbta.
- Zlepšuje držanie tela počas spánku.
- Podporuje regeneráciu po zraneniach a zraneniach.
- Vhodné pre tehotné ženy, poskytuje dodatočnú podporu počas spánku.

TIP

Výrobok je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia. V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery: 23 cm x 22 cm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ortopedický vankúš je určený na použitie počas spánku alebo odpočinku. Nemalo by sa používať ako hračka, sedadlo alebo na iný účel, ktorý by ho mohol poškodiť.

Uistite sa, že vankúš nemá žiadne mechanické poškodenie, ako sú praskliny, trhliny alebo deformácie, ktoré môžu ovplyvniť jeho účinnosť.

Vankúš nie je odolný voči vysokým teplotám. Udržujte ho mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla, aby ste predišli riziku požiaru.

Vankúš by sa mal skladovať v suchom prostredí, aby sa zabránilo rastu plesní alebo húb na materiáli.

Pravidelne čistite snímateľný kryt, aby ste zabezpečili hygienické podmienky používania. Pamäťovú penu neperte v práčke – v prípade potreby ju jemne utrite vlhkou handričkou.

Na vankúši neseďte ani nestojte, pretože to môže poškodiť jeho štruktúru a znížiť funkčnosť pamäťovej peny.

Ak ste alergický na materiály, z ktorých je vankúš vyrobený, poraďte sa pred jeho použitím so svojim lekárom.

Deti by nemali vankúš používať bez dozoru, aby sa predišlo riziku nesprávneho použitia alebo poškodenia výrobku.

Ak je poškodený vonkajší obal alebo samotná pena, prestaňte výrobok používať, aby ste sa vyhli kontaktu s vnútornými materiálmi.

Keď dostanete nový vankúš, nechajte ho niekoľko hodín v dobre vetranej miestnosti, aby ste odstránili akýkoľvek zápach spôsobený výrobným procesom.

Vyhňte sa používaniu vankúša vo vlhkom prostredí alebo na mokrych povrchoch, aby nedošlo k poškodeniu materiálov.

Ak máte problémy s chrbticou, bedrovým kĺbom alebo kolenom, pred pravidelným používaním ortopedického vankúša sa poraďte so svojim lekárom.

SKLADOVANIE, ČISTENIE

Vankúš by sa mal skladovať na suchom, vetranom mieste, mimo dosahu vlhkosti, aby sa zabránilo rastu plesní a húb.

Neskladujte vankúš na priamom slnku, pretože to môže ovplyvniť trvanlivosť pamäťovej peny.

Vankúš skladujte v ochrannom obale alebo krabici, aby ste zabránili hromadeniu prachu.

Vankúš neskladujte v blízkosti radiátorov, sporákov alebo iných zdrojov tepla, pretože vysoká teplota môže penu poškodiť.

Ak si vankúš vezmete na výlet, použite ochrannú tašku, aby ste ho nezašpinili alebo nepoškodili.

Použite jemný čistiaci prostriedok.

Penu neperte v práčke ani ju neponárajte do vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu materiálu.

Ak je znečistený, povrch jemne utrite vlhkou handričkou alebo špongiou. Vyhňte sa nadmernému namáčaniu.

Nechajte penu úplne vyschnúť na vzduchu na dobre vetranom mieste.

Pri čistení peny a obliečky na vankúš sa vyhýbajte agresívnym chemikáliám, bielidlám alebo odstraňovačom škvŕn, ktoré môžu poškodiť materiál.

Aby ste sa zbavili zápachu, vystavte vankúš na niekoľko hodín čerstvému vzduchu (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu).

Na odstránenie chlpkov alebo drobných nečistôt môžete použiť valček na oblečenie alebo vysávač s jemnou špičkou.

Perte obliečku na vankúš každých pár týždňov alebo podľa potreby na udržanie hygieny.

Penu čistite len v prípade potreby.

Dodržiavanie správnej hygieny a správne skladovanie udrží vankúš v dobrom stave po dlhú dobu, zaisťuje pohodlie a funkčnosť.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytujú obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez upozornenia.

Dovozce / Dovožca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl