

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bederní polštář Comfort z paměťové pěny

SYMBOL: 24278; EAN/GTIN: 5907451336748

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - POKYNY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ

Bedrový vankúš Comfort z pamäťovej peny

SYMBOL: 24278; EAN/GTIN: 5907451336748

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.



POPIS

Bederní polštář je ideálním řešením pro lidi, kteří chtějí pečovat o zdraví své páteře, zlepšit držení těla a snížit napětí v bederní části. Díky svému ergonomickému designu a speciální výplni poskytuje dostatečnou oporu dolní části zad, snižuje zátěž a nepohodlí při sezení nebo ležení.

APLIKACE

Zlepšení držení těla
Snížení bolesti
Podpora během spánku
Pro těhotné ženy
Pro aktivní lidi a při rehabilitaci

TIP

Výrobek by mělo být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka: 25 cm
Délka: 45 cm
Tloušťka: 10 cm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bederní polštář je navržen tak, aby podpíral spodní část zad při sezení nebo vleže. Nepoužívejte jej způsobem, který by mohl vést k nesprávné podpoře těla.
Pokud při používání polštáře pocítíte nepohodlí, bolest nebo svalové napětí, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo fyzioterapeutem.
Lidé s vážnými problémy s páteří, chronickými bolestmi zad nebo jinými potížemi by se měli před použitím polštáře poradit s lékařem.
Doporučuje se dělat pravidelné přestávky v sezení, a to i při použití polštáře, aby nedošlo ke ztuhnutí svalů a ke zlepšení krevního oběhu.
Polštář by měl být používán na stabilních sedadlech nebo lehátkách, aby byla zajištěna bezpečnost a optimální podpora.
Výrobek není hračka. Děti mohou polštář používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
Materiály použité k výrobě polštáře mohou být hořlavé. Udržujte jej mimo dosah ohně, radiátorů a jiných zdrojů vysoké teploty.
Před každým použitím se ujistěte, že polštář nemá žádné poškození, jako jsou trhliny v materiálu nebo deformace výplně.
Polštář by měl být používán v přirozeném tvaru, aby si zachoval podpůrné vlastnosti.
Po použití uložte polštář na suché místo, abyste zabránili vlhkosti, která může ovlivnit kvalitu materiálu.
Pokud zaznamenáte alergickou reakci na materiály polštáře, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
Ujistěte se, že je váš polštář umístěn správně, aby co nejlépe podpíral vaši bederní páteř.
Polštář lze používat za jízdy, ale ujistěte se, že neomezuje svobodu pohybu nebo přístup k ovládacím prvkům vozidla.

SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ

Pěna by se neměla ponořovat do vody ani mýt. Chcete-li odstranit nečistoty, jemně otřete jeho povrch vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Materiál nadměrně nenamáčejte.
Obvykle se doporučuje prát potah v jemném cyklu při maximální teplotě 30°C.
Používejte jemné čistící prostředky a vyhněte se bělidlům a agresivním chemikáliím.
Po vyprání osušte potah naplocho na dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo nebo zdroje tepla.
Polštář čas od času provětrejte na suchém a vzdušném místě, abyste odstranili vlhkost a pachy.
Nepoužívejte bělidla, silné čistící prostředky nebo rozpouštědla, která mohou poškodit materiál krytu nebo výplně.
Pravidelně kontrolujte polštář, zda není znečištěný, nepříjemný zápach nebo poškození. V případě potřeby jej jemně obnovte nebo vyčistěte, jak je doporučeno výše.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez předchozího upozornění.

Vážený pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

POPIS

Bedrový vankúš je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí sa chcú postarať o zdravie svojej chrbtice, zlepšiť držanie tela a znížiť napätie v bedrovej časti. Vďaka ergonomickému dizajnu a špeciálnej výplni poskytuje dostatočnú oporu krížom, čím znižuje záťaž a nepohodlie pri sedení alebo ležaní.

APLIKÁCIA

Zlepšenie držania tela
Zníženie bolesti
Podpora počas spánku
Pre tehotné ženy
Pre aktívnych ľudí a pri rehabilitácii

TIP

Výrobok je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.

V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka: 25 cm
Dĺžka: 45 cm
Hrúbka: 10 cm

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bedrový vankúš je navrhnutý tak, aby podopieral kríže pri sedení alebo ležaní. Nepoužívajte ho spôsobom, ktorý môže mať za následok nesprávnu oporu tela.

Ak počas používania vankúša pocítite nepohodlie, bolesť alebo svalové napätie, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo fyzioterapeutom.

Ľudia s vážnymi problémami s chrbticou, chronickými bolesťami chrbta alebo inými ochoreniami by sa pred použitím vankúša mali poradiť s lekárom.

Odporúča sa robiť pravidelné prestávky v sedení aj pri použití vankúša, aby sa predišlo stuhnutiu svalov a zlepšil sa krvný obeh.

Vankúš by sa mal používať na stabilných sedadlách alebo ležadlách, aby bola zaistená bezpečnosť a optimálna podpora.

Výrobok nie je hračka. Deti môžu vankúš používať len pod dohľadom dospelého osoby.

Materiály použité na výrobu vankúša môžu byť horľavé. Udržujte ho mimo dosahu ohňa, radiátorov a iných zdrojov vysokej teploty.

Pred každým použitím sa uistite, že vankúš nie je poškodený, ako sú trhliny v materiáli alebo deformácie výplne.

Vankúš by sa mal používať v prirodzenom tvare, aby si zachoval podporné vlastnosti.

Po použití uložte vankúš na suché miesto, aby ste zabránili vlhkosti, ktorá môže ovplyvniť kvalitu materiálu.

Ak spozorujete alergickú reakciu na materiály vankúša, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Uistite sa, že je váš vankúš správne umiestnený, aby čo najlepšie podporoval vašu drevkovú chrbticu.

Vankúš možno používať počas jazdy, ale uistite sa, že neobmedzuje slobodu pohybu alebo prístup k ovládacím prvkom vozidla.

SKLADOVANIE, ČISTENIE

Pena by sa nemala ponárať do vody ani umývať. Ak chcete odstrániť nečistoty, jemne utrite jeho povrch vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Materiál príliš nezmáčajte.

Poťah sa zvyčajne odporúča prať v jemnom cykle pri maximálnej teplote 30°C.

Používajte jemné čistiace prostriedky a vyhýbajte sa bielinám a agresívnym chemikáliám.

Po vypraní poťah vysušte naplocho na dobre vetranom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla.

Vankúš z času na čas vyvetrajte na suchom a vzdušnom mieste, aby ste odstránili vlhkosť a pachy.

Nepoužívajte bieliná, silné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť materiál krytu alebo výplne.

Pravidelne kontrolujte vankúš, či neobsahuje nečistoty, nepríjemný zápach alebo poškodenie. Ak je to potrebné, jemne ho obnovte alebo vyčistite podľa vyššie uvedeného odporúčania.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez predchádzajúceho upozornenia.

Dovozce / Dovoźca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl