

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Masážní akupresurní pantofle vel. 38-39

SYMBOL: 15527_S; EAN/GTIN: 5907451316962

Masážní akupresurní pantofle vel. 40-41

SYMBOL: 15527_M; EAN/GTIN: 5907451316955

Masážní akupresurní pantofle vel. 42-43

SYMBOL: 15527_L; EAN/GTIN: 5907451316948



CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS

Akupresurní pantofle jsou speciální masážní obuví, která díky zabudovaným masážním bodům stimuluje konkrétní oblasti chodidel a pozitivně působí na celé tělo. Jejich podrážky jsou vybaveny cvočky a magnety, které stimulují krevní oběh, snižují stres a zlepšují pohodu.

Použití: Zpočátku se doporučují pantofle nosit cca 10 minut denně aby si na ně tělo zvyklo. Postupně můžete čas prodlužovat.

Výrobek je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské nebo komerční použití a nemůže nahradit lékařskou terapii. Výrobek je určen pro použití v suchých místnostech. Není určen pro lékařské, terapeutické nebo komerční použití. Výrobek není zdravotnický prostředek.

TIP

- Výrobek musí být zkontrolován z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velikost: 38/39
- Výrobek má 41 rotačních masážních výstupků
- Antibakteriální a prodyšné
- Bílé výčnělky obsahují stříbro
- Červené výběžky obsahují hořčík.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Pantofle nesmí používat těhotné ženy, osoby s těžkým onemocněním vnitřních orgánů nebo akutním zánětem.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Fóliový obal výrobku uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Vyhněte se zdrojům vznícení: vyhněte se kontaktu s plameny nebo zařízeními generujícími teplo (může způsobit požár).
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, rozpouštědly.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pokud bezpečné používání již není možné, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečné používání již není možné, pokud výrobek: - byl poškozen, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.

Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny v textu, designu a produktových datech bez upozornění.

Dovozce / Dovožca

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl